

機械器具 21 内臓機能検査用器具
一般医療機器 心臓内心電計ケーブル及びスイッチ 35562020

延長ケーブル


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- この延長ケーブルは、エムピーカテーテル電極専用であるため他のカテーテル電極は接続できません。
- 生理食塩液の中には、本体（コネクタ部）及びコンタクトピンを浸けないこと。（電位が出なくなる可能性がある）

* 【形状・構造及び原理等】

*<本品の基本構成>

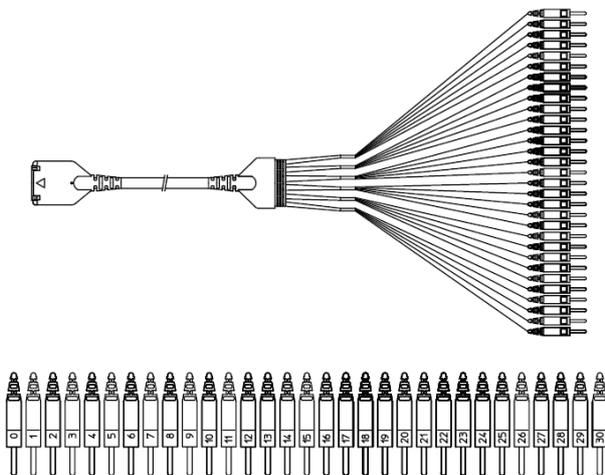

【使用目的又は効果】

エムピーカテーテル電極と心電計本体（中継ピンボックス）を接続する導線。電極を含まない。

【使用方法等】

汚染に十分注意した上で包装内から取り出し、エムピーカテーテル電極と心電計本体を接続する。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- ・包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し安全な方法で処分すること。
- ・本品を過度に曲げたり、よじったりしないこと。（破損する可能性がある。）
- ・エムピーカテーテル電極と延長ケーブルのコネクタ部を接続する際は、両コネクタの接続形状を合せて接続すること。また、取り外す時は、エムピーカテーテル電極側のコネクタ部の両横にあるロック解除つまみを押さえたまま引き抜くこと。（ロック解除をせずに無理に引き抜くとコネクタを破損する可能性がある。）
- ・接続部は使用中に緩まないように、しっかり接続すること。また、定期的に確認すること。
- ・電極のつながっているコンタクトピンの金属部が、露出しないように注意すること。
- ・コード類を取り外すときは、コネクタおよびプラグを持って引き抜くこと。（コードを持って引き抜くと断線やプラグ破損の可能性がある。）

* 【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管して下さい。
- ・本製品を折り曲げたり、下積みなどで押しつぶさないように注意して下さい。

* 【使用期限】

包装（ラベル）に使用期限を表示している。[自己認証による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売元】

フォルテ グロウ メディカル 株式会社
電話番号 0283-22-2801