

\*\* 2017年6月改訂（第3版）（新記載要領に基づく改訂）  
\* 2005年12月改訂（第2版）

医療機器承認番号：15800BZZ00333000

機械器具 74 医薬品注入器  
管理医療機器 注射筒用フィルタ 15283000

## ファインフィルターF

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

### 【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- ・包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意すること。

### 【形状・構造及び原理等】

<本品の基本構成>



### 【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

\*\* [使用期限]

箱の使用期限欄を参照のこと。[自己認証による]

*型式	*異物除去率	
F72	30 $\mu$ m 以上	100%
F108	10 $\mu$ m 以上	99%
F162	10 $\mu$ m 以上	99%
F194	5 $\mu$ m 以上	99%

\*【製造販売業者及び製造業者の名称又は名称等】

[製造販売元]

フォルテ グロウ メディカル株式会社

電話番号：0283-22-2801

### 【使用目的又は効果】

- ・異物濾過を目的として使用する。
- ・本品は滅菌済みであるので、そのまま直ちに使用できる。

### 【使用方法等】

1. 汚染に十分注意し、包装から取り出す。
2. 輸液セットのタコ管又は、濾過する薬液等の入った注射器の先端ルアー部等に本品を接続する。
3. 本品のキャップをはずし、注射針を接続する。
4. 注射針が上を向くように垂直に持ち、2～3滴液が出るまで操作し、フィルター内の空気を徐々に追い出してから使用する。

### [使用方法に関連する使用上の注意]

- ・すべての操作は、無菌的に行うこと。
- ・粘度の高い薬液や血液、血液製剤等には、使用しないこと。