

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 内視鏡用送水タンク 36500042


ウォータータンク

【禁忌・禁止】

- 滅菌は行わないこと。[E O G滅菌や高圧蒸気滅菌等に対する耐久性を確保しておりません。]

【形状・構造及び原理等】

<形状図>

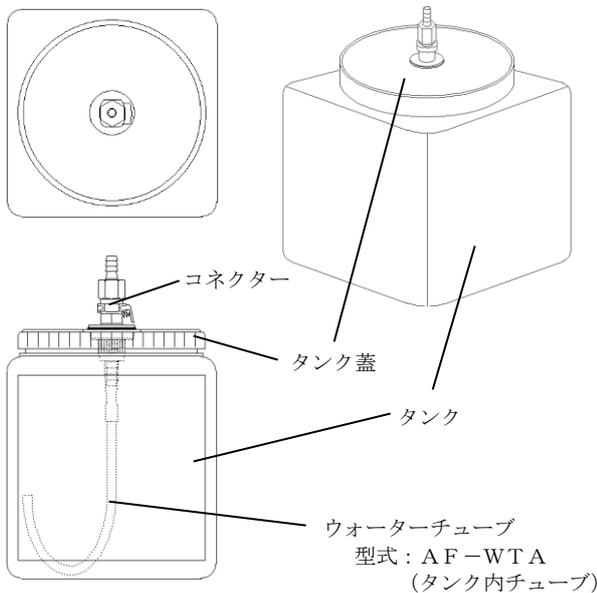

- 本品はポリ塩化ビニル(可塑剤:フタル酸ジ(2-エチルヘキシル))を使用している。
- 各構成部品は、省略又は追加される場合もある。

【使用目的又は効果】

- 本品は、内視鏡用の送水装置等に接続する送水用の貯水タンクである。

【使用方法等】

<組み合わせて使用する医療機器>

- 本品は、下記の医療機器との組み合わせ専用であるため、他の医療機器と組み合わせて使用しないこと。

- ** a. 内視鏡用送水装置 : ウォータープリーズ
(認証番号: 220AHBZX00007000)
ウォータープリーズ 2
(認証番号: 302AGBZX00071000)
- b. 送気送水チューブ : ウォーターチューブ
(届出番号: 09B1X00004000129)

- 下記の説明は一般的な使用方法である。従って、細部については医師の臨床経験に基づき、手順の追加、変更が必要である。

- ①本品及び併用する医療機器の添付文書を確認する。
- ②使用前に消毒・洗浄を行う。消毒・洗浄方法は下記のとおり。
<消毒方法(例)>
中性洗剤でブラッシングした後、次亜塩素酸ナトリウム溶液に1時間以上浸す。
<消毒後の洗浄方法(例)>
滅菌水でタンクの内部及び外部を洗い流す。
- ③本品に汚れや変形・破損等がないことを確認する。万一異常が認められた場合は使用しないこと。
- ④タンクのコネクタにチューブをしっかりと接続する。
- ⑤タンク内に溢れない程度に送水液を注ぎ、蓋をする。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 本品の使用に際しては、医師の指示に従って使用すること。
- ** ●本品は、「ウォーターチューブ」と「ウォータープリーズ」または「ウォータープリーズ2」と組み合わせて使用するため、その他の医療機器と組み合わせて使用しないこと。
- 本品が破損していたり、汚損した場合には使用しないこと。
- 乱暴な取扱いをすると、破損・亀裂のおそれがあるので、製品の取扱いには十分注意すること。
- 可塑剤であるフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)が溶出するおそれがあるので注意すること。(ウォーターチューブ)
- 本品は未滅菌品であるので、初めて使用する際は消毒・洗浄を必ず行うこと。
- 使用後は、速やかに洗浄・消毒を行うこと。[時間が経つにつれ消毒が不十分になり、感染の恐れがある。]
また、十分に乾燥してから保管すること。
- 消毒液の蒸気は人体に悪影響を与えるおそれがあるので、消毒を行う際は十分に換気を行うこと。
- 本品を廃棄する際は、適切に処分すること。[医療廃棄物に該当するかどうかは、使用状況によって判断すること。]

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- * ●消毒又は洗浄したタンクは、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

[使用期限]

- 使用期限は正しく使用した場合、原則3年とする[自己認証(当社データ)による]

【保守・点検に係る事項】

- ゴムや樹脂部分は、使用薬剤や経時変化によって劣化するので、注意すること。

** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売元]

フォルテグロウメディカル株式会社
電話番号 0283-22-2801