

\*\* 2017年6月改訂（第3版）（新記載要領に基づく改訂）  
\* 2011年12月改訂（第2版）

医療機器認証番号：223AABZX00138000

機械器具 6 呼吸補助器  
管理医療機器 経鼻用酸素供給カニューレ 35203000

## 酸素カニューラ

### 再使用禁止

#### \* 【警告】

##### <使用方法>

- 使用前に装置との接続が正しいこと及び接続部が確実に漏れないことを確認すること。

#### 【禁忌・禁止】


- 再使用、再滅菌禁止
- 使用中は火気を近づけないこと。又、高温の場所や燃えやすい物がある所では使用しないこと。[爆発や火災の原因となるため]

#### 【形状・構造及び原理等】

##### 1. 概要

本品は、経鼻的に酸素ガスを投与するために用いる。

##### 2. 各部の名称

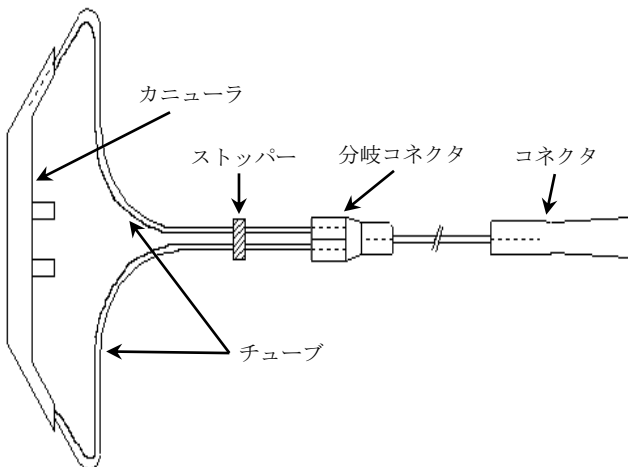

#### \* 3. 材質

カニューラ	ポリ塩化ビニル
チューブ	ポリ塩化ビニル
ストッパー	ポリエチレン
分岐コネクタ	ポリ塩化ビニル
コネクタ	ポリ塩化ビニル

本品は、ポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ-2-エチルヘキシル）を使用している。

#### ●サイズ

L（一般用）、M（小児用）、S（幼児用）

#### 【使用目的又は効果】

- 経鼻的に酸素ガスを投与するために用いる。

#### 【使用方法等】

1. 酸素供給源にコネクタを接続する。
2. カニューラを鼻孔に装着し、チューブを両耳にかけてから、ストッパーで調節し固定する。

#### 【使用上の注意】

##### [重要な基本的注意]

- 本品の使用により皮膚に異常が認められた場合は、直ちに使用を中止して医師に相談すること。
- 本品は、医師の処方及び指示に従って使用すること。
- 使用中は本人はもちろん、近くにいる人もタバコは吸わないこと。
- 本品と装置の接続及び取り外しの際は、コネクタを持って行うこと。
- 毛染剤・化粧品その他の色落ちするものや目薬などの薬剤との接触により、変色することがある。また、長期間の使用や洗剤洗浄、アルコール清拭、軟膏などの油性薬剤の使用により、変質・硬化することがある。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### [保管方法]

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

##### [使用期限]

包装（ラベル）に使用期限を表示している。[自己認証による]

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

##### [製造販売元]

フォルテ グロウ メディカル 株式会社  
電話番号：0283-22-2801